

MIRAI SPEAKER®

取扱説明書

ミライスピーカー・イヤークライト
MSE-MIRAI02



保証書在中

MR15-26021 v1




本製品は医療機器ではなく、補聴器としての効果・性能を保証するものではありません。
また、病気や症状の診断、治療等を目的としたものではありません。
聴力について気になることがある場合は医療機関での受診をお勧めします。

安全上のご注意 ※必ずお守りください

ご使用の前に、取扱説明書および箱に同梱されている資料をお読みのうえ、製品を安全にお使いください。またお読みになったあとは、いつでも確認できる場所に保管してください。本製品は安全には十分配慮して設計しておりますが、使い方を誤ると事故が起こることがあります。未然に防ぐためにも、下記の内容を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示に従わないと、死亡または重傷に至る切迫した危険があります。
 警告	この表示の指示に従わないと、死亡または重傷を負うおそれがあります。
 注意	この表示の指示に従わないと、軽傷を負うおそれや、物的損害の発生するおそれがあります。



危険



接触禁止

本製品内部から漏れた液体には触らないでください。
目に入った場合はこすらず、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。



分解禁止

分解や改造はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。



火気禁止

充電ケースおよび本体は火中に投棄しないでください。爆発や火災の原因になります。



警告



禁止

子供やペットの手の届く場所に置かないでください。



禁止

子供や監督が必要な方は使用しないでください。



禁止

必要以上に大きな音量で使用しないでください。
長時間大音量で聴くと聴力障害を引き起こすおそれがあります。



注意

耳の治療を受けている方、手術や治療の経験がある方、または耳に変形がある方は、必ず医師の指導を受けてから使用してください。



注意

使用中に皮膚のかぶれ・湿疹・耳だれ・めまい・吐き気・胸の痛み等の症状が出た場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。



注意

X線、CT、MR、PET検査、電気治療、手術の際は必ず外してください。
強い電磁界により物理的損傷を起こすおそれがあります。



指示

指定のUSB-ACアダプター（市販）とUSBケーブルを使用してください。
不明な場合は販売店さまもしくはミラリスピーカーサポートへお問合せください。



禁止

湿度の高い場所や高温環境（サウナ室、直射日光下、夏季の車内など）での保管・使用はしないでください。



ぬれ手禁止

充電ケーブルや充電ケースは、濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。



風呂、シャワー室での使用禁止

浴室や湿気の多い場所で充電しないでください。感電・火災の恐れがあります。



禁止

ベンジン、シンナー、アルコール入り洗剤、接点復活剤を使用しないでください。



爆発や危険のある環境では使用しないでください。

禁止



火気に近づけないでください。

火気禁止

注意



子供は保護者が安全を確認したうえで使用してください。

注意



製品に強い衝撃を与えないでください。

禁止



長時間大音量で使用しないでください。聴覚を損傷するおそれがあります。
不快感を覚えた場合は直ちに使用を中止してください。

禁止



高周波、マイクロ波、短波機器と同時に使用しないでください。

禁止



携帯電話などの電波がノイズや音量低下を引き起こす場合があります。

注意



酸素濃度の高い環境では使用しないでください。

禁止



就寝時には使用しないでください。

禁止



他人に貸与しないでください。

調整が異なる集音器を使用すると聴覚を損傷するおそれがあります。

禁止



磁気を発生する物に近づけないでください。製品機能低下の原因となります。

禁止



内部には精密部品が含まれています。針などでこじ開けたり、内部に触れたりしないでください。

禁止



満充電表示後は過充電防止のため速やかに電源プラグを抜いてください。

電源プラグを抜く



暖房器具の近くや加湿器付近など高温多湿の場所に置かないでください。

禁止



製品を常に清潔に保ち、集音キャップや集音マイクを異物で塞がないでください。
塞がると増幅効果が低下します。

指示



集音キャップは定期的に点検・交換してください。

指示

イヤホン本体の防水性能について

本製品のイヤホン本体のみが粉塵と噴流水に対しての限定的な保護を提供するIP55相当の性能を備えています。完全な防水ではありません。

また、充電ケースには防水・防塵性能がありません。以下の注意事項をお守りください。

使用上の注意

- 充電ケースには防水防塵を備えていないため、水濡れにご注意ください。
- 本体が濡れた状態や、濡れた手で充電ケースに収納しないでください。
- 水に濡れた場合は、乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取ってから充電してください。
- 石鹸水、洗剤水、入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、プール水、海水などがかった場合はただちに真水で洗い流してください。
- 強い水流を直接当てないでください。防水性能が損なわれるおそれがあります。
- 高温のお湯をかけないでください。変形や故障の原因になります。
- 水中での使用はできません。
- 電子レンジやヘアドライヤーで乾かすと発火爆発の危険がありますので絶対に行わないでください。


充電時の注意

- 充電前に本体の水分を完全に拭き取ってください。
- 充電端子が濡れたまま充電すると、腐食・発熱・発火の原因になります。
- 濡れた手で充電ケースや電源プラグに触らないでください。感電のおそれがあります。

目次

同梱物一覧	1
各部の名称（イヤホン本体）	2
各部の名称（充電ケース）	3
初めてご使用になるまえに	4
イヤホン本体の電源を入れる / 切る方法	5
装着方法	6
集音時の音量調整方法	7
シーン切り替え / 充電ケースのリセット方法	8
Bluetooth® を接続し通話や音楽を楽しむ	9
スマートフォンとの接続方法（iPhone）	10
スマートフォンとの接続方法（Android）	12
集音キャップの入れ替え方法	14
メンテナンスとクリーニング	15
よくある質問	16
保管方法 / 廃棄・輸送に関する注意	20
仕様	21
保証書	22
お客様登録のお願い	23


同梱物一覧

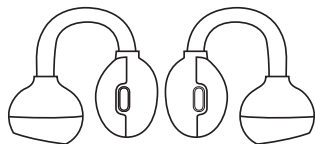

イヤホン本体




充電ケース

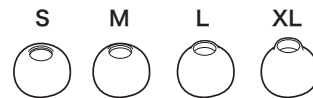

集音キャップ(8個)



クリーニングブラシ

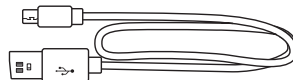

充電ケーブル
(USBType-C)




取扱説明書

* USB-ACアダプターは付属しておりません。


* USB Type-C® はUSB Implementers Forumの登録商標です。

各部の名称 (イヤホン本体)

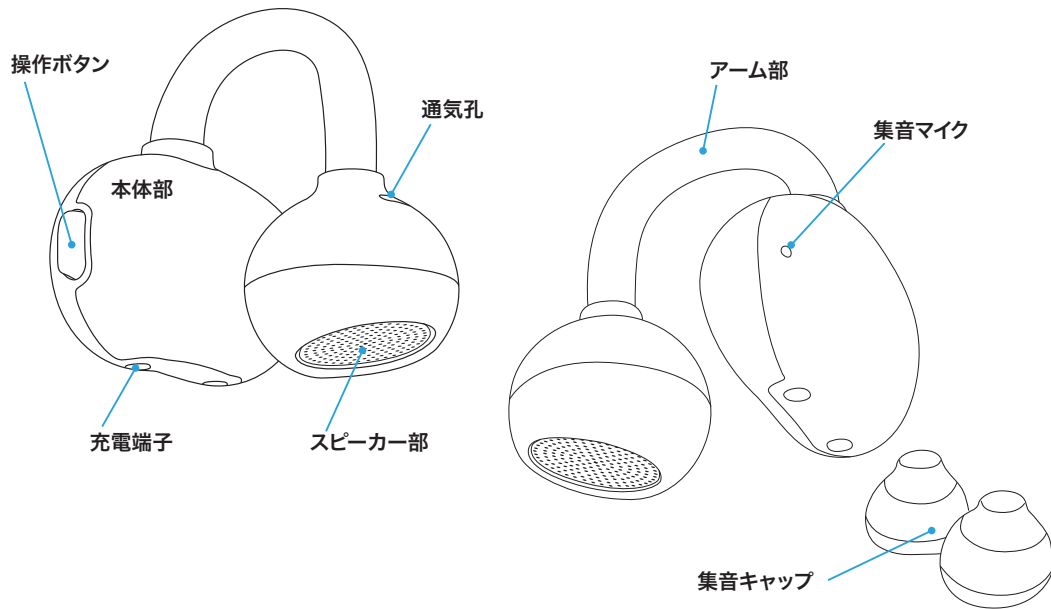

* 本製品には、あらかじめLサイズの集音キャップが装着されています。

各部の名称 (充電ケース)

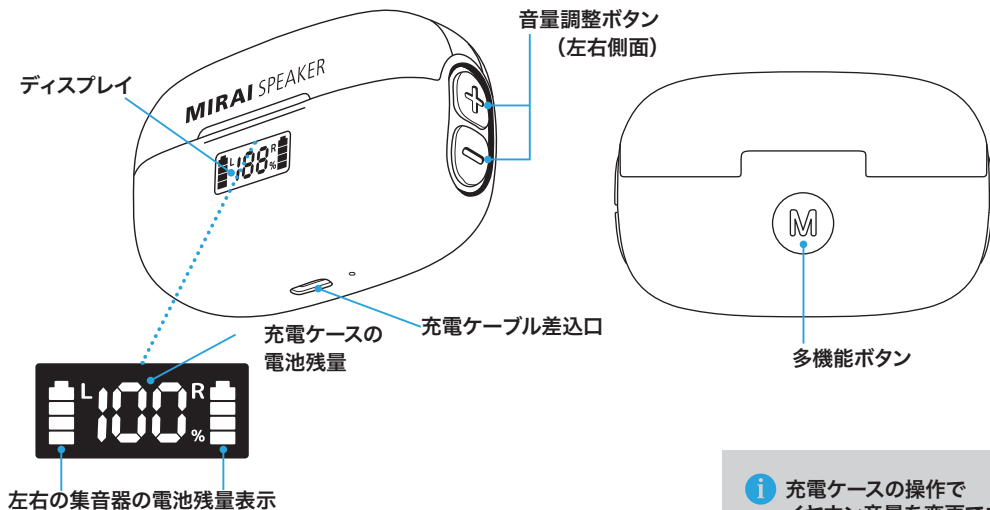



- * イヤホン本体を充電ケースに正しく収納すると、ディスプレイの電池残量表示が点灯します。点灯しない場合、正しく充電ができていない可能性があるためイヤホン本体を収納スペースに押し込むようにして奥までしっかり収納してください。
- * 充電時は数字の下1桁が点滅します。
- * 充電ケースの充電状況は10%刻みで表示されます。
- * 充電ケースの充電中は音量調整ボタンをご利用いただけません。

i 充電ケースの操作でイヤホン音量を変更できます

右側のイヤホンの音量は充電ケース右側のボリューム調整ボタン、左側のイヤホンの音量は充電ケース左側の音量調整ボタンで調整ができます。

初めてご使用になるまえに

初めてご使用になる前に、以下の手順で集音器を「起動」して頂く必要があります。
保護シールをはがしたうえで、一度イヤホン本体を充電ケースに収納し、5秒程度待つと「起動」が完了し、正常に動作します。

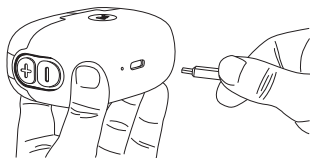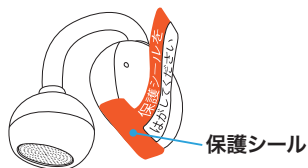


- 1 イヤホン本体の充電端子部分の保護シールをはがしてください。
- 2 イヤホン本体を充電ケースに入れてフタを閉じ5秒程度待ちます。
- 3 充電ケースの音量ボタンもしくは多機能ボタンを短く押してください。
- 4 その後、充電ケースからイヤホン本体を取り出してお使いください。このとき、ディスプレイの左右にバッテリー残量が表示されない場合は、ケースを一度閉じてから開けて、充電ケースに再度入れてください。

- * 本機はあらかじめ充電がされていますが、最適な性能を得るため、ご使用前に満充電をすることを推奨します。充電完了までの所要時間は約2時間です。
- * USB-ACアダプターは付属しておりません。お手持ちのスマートフォンなどの充電器をご利用いただくか、ご購入をお願いします。
- * 5V1A以上のUSB-ACアダプターをご使用ください。


* イヤホン本体の満充電までの所要時間は約2時間です。

イヤホン本体の電源を入れる / 切る方法

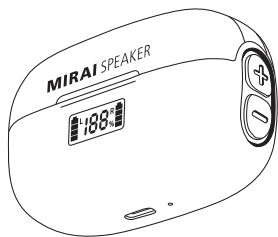

電源の入れ方

- 充電ケースからイヤホン本体を取り出すと、自動的にイヤホン本体の電源が入ります。
- 手で電源を入れる場合は、電源を入れたい方のイヤホン本体の操作ボタンを1度短押しし、電源が入るまで3秒程度お待ちください。

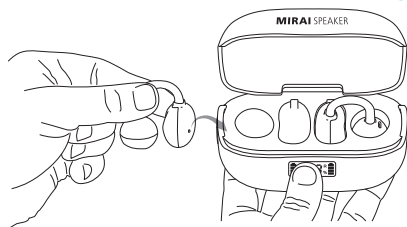

電源の切り方


- イヤホン本体を充電ケースに戻し、フタをしっかりと閉めると自動的にイヤホン本体の電源が切れます。
- 手で電源を切る場合は、電源を切りたい方のイヤホン本体の操作ボタンを5秒間長押ししてください。

* イヤホン本体を充電ケースに正しく収納すると、ディスプレイの電池残量表示が点灯します。点灯しない場合、正しく充電ができていない可能性があるためイヤホン本体を収納スペースに押し込むようにして奥までしっかり収納してください。


* 集音器モードでの連続使用時間は最長10時間です。

* 充電ケースが満充電時、3回のフル充電が可能です（充電器での充電を含めた連続使用時間：約40時間）。


装着方法

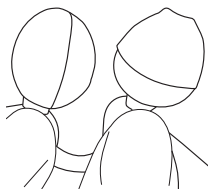

- 1 イヤホン本体をつまみ、アームをゆっくり開きます。
(開きすぎると破損の恐れがあるため、優しく開く程度)

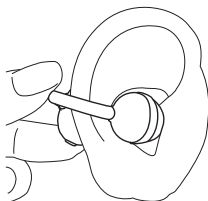

- 2 スピーカー部を耳穴に軽く入れ、スピーカー部と本体部で耳をはさむように、本体部を耳の裏側に差し込みます。

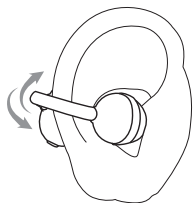

- 3 集音キャップの先端の穴が「耳の穴」に向かう角度になるよう、イヤホンを回して調整します。


* 耳の穴の奥深くまで挿入する必要はありません、適切な距離を保つことで効率的に音を伝達できます。

* スピーカー部分が耳の穴と向き合い、装着が安定し、圧迫感がない状態にしてください。

集音時の音量調整方法

イヤホン本体のボタンで音量を上下できます。

音量レベルは合計で11段階あり、1段階調整するごとに音量が3dB変化します。

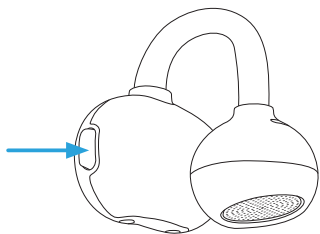


イヤホン本体での音量調整方法

- イヤホン本体の操作ボタンを1回短押しで音量が1上がります。
- イヤホン本体の操作ボタンを2回短押しで音量が1下がります。

充電ケースでの音量調整方法

- 右側面の音量調整ボタンで右側イヤホンの音量調整ができます。
- 左側面の音量調整ボタンで左側イヤホンの音量調整ができます。

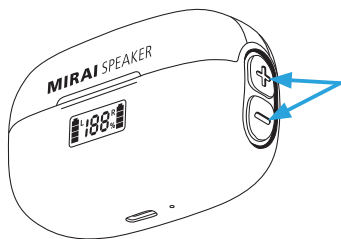

音量レベルについて

- 音量レベルは全11段階あります。
- 最大音量に達すると「最大音量」とアナウンスされます。
- 最小音量に達すると「最小音量」とアナウンスされます。
- 音量を1段階上げたり下げたりすることにより、選定した音量の数字がアナウンスされます（例：2 など）。

シーン切り替え/充電ケースのリセット方法

シーン切替機能

多機能ボタンを短押し1回で、順番にシーンが切り替わります。それぞれのシーンに合わせた適切なプログラムが動作するように設定されています。



1 室内シーン…オフィス、会議室、図書館などの静かな屋内環境などで



2 屋外シーン…レストラン、バス停、地下鉄駅など、比較的騒音レベルが高い場所で



3 TVシーン…映画鑑賞やテレビ視聴のシーンで



4 強風シーン…風の強い日などに

リセット機能

以下の手順でリセットを行うと、集音器が工場出荷時の設定に戻ります。

- 1 充電ケースのフタを開け、イヤホン本体を収納した状態で、フタを開けて閉じる動作を8秒以内に5回繰り返してください。
- 2 成功するとディスプレイが5回点滅します。
- 3 その後、多機能ボタンを10秒間長押ししてください。

上記手順を行うことでリセットが完了します。

Bluetooth® を接続し通話や音楽を楽しむ

MIRAI SPEAKER EarはBluetooth®を搭載しており、iPhoneやAndroidなどのスマートフォンと接続できます。スマートフォンと接続すると、音楽再生やハンズフリー通話が可能になります。通話時と音楽再生時は一時的に集音が無効になります。通話や音楽再生が終了すると自動的に集音が再開します。

通話時操作

着信応答：操作ボタンを1回押す

通話音量を上げる：通話中に操作ボタンを1回押す

通話音量を下げる：通話中に操作ボタンを2回押す


* 着信を切る際はスマートフォン側で操作してください。

音楽再生時操作

音楽の再生／一時停止：操作ボタンを2秒長押し

音楽音量を上げる：操作ボタンを1回押す

音楽音量を下げる：操作ボタンを2回押す

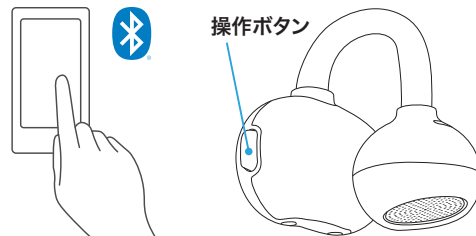

- * Bluetooth®で音声 스트リーミングする場合は最長6時間使用できます。
- * 本機と接続が出来るデバイスは1台のみです（複数デバイスとの接続不可）。
- * 急ぎ集音を復帰したいときはBluetooth®接続を解除してください。集音機能の再開タイミングはデバイスやアプリによって異なります。

- * iPhoneはApple inc.の登録商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- * Androidは、Google LLCの登録商標です。
- * Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、当社はライセンスに基づきこれらのマークを使用しています。
- * Bluetooth®接続及びアプリとの動作はそのすべての接続・動作を保証するものではありません。

スマートフォンとの接続方法 (iPhone)

- 1 ホーム画面で「設定」アイコンを開きます。
- 2 「Bluetooth®」を選択し、3 設定画面でBluetoothをオンにします。
- 4 充電ケースのフタを開けてしばらく待つと、「MS Ear Lite」というデバイス名が表示されます。
* 電池残量がない場合、接続できません。
- 5 「MS Ear Lite」をタップすると接続が始まり、6 「接続済み」と表示されると完了です。


1 「設定」を開く



2 「Bluetooth」を
タップ




3 「Bluetooth」を
オンにする

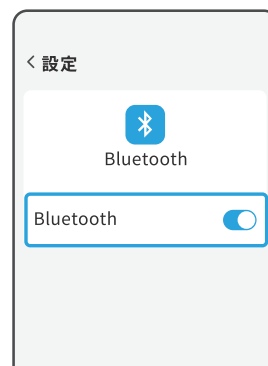


注意 充電ケースのフタを開けてから5分以内にスマートフォンと接続してください。5分を過ぎると「MS Ear Lite」が検出されなくなります。その場合は一度集音器を充電ケースに戻し、再度取り出してから接続を行ってください。

4 充電ケースのフタを開き
しばらく待つ

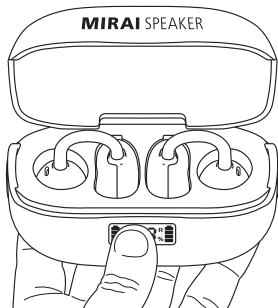

5 「MS Ear Lite」をタップ

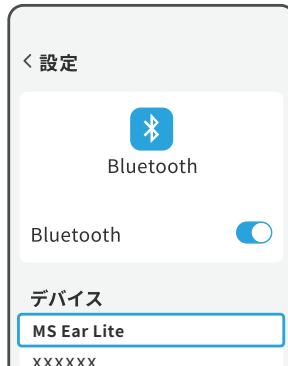


6 「接続済み」を確認




* Bluetooth®の接続が上手くいかない場合、設定画面でbluetooth®をオフにし、もう一度最初の手順からお試ください。


スマートフォンとの接続方法 (Android)

- 1 スマートフォンの画面上部を下にスライドし、メニューを開き、「Bluetooth®」または  アイコンを長押しします。
- 2 「新しいデバイスとペア設定する」をタップします。
- 3 集音器のフタを開けてしばらく待つと、「MS Ear Lite」というデバイス名が表示されます。
* 電池残量がない場合、接続できません。
- 4 「MS Ear Lite」というデバイス名が表示されたらタップし、5 「連絡先と通話履歴へのアクセスを許可する」のボックスにチェックを入れ、6 「ペア設定する」をタップします。


1 「Bluetooth」を
長押し

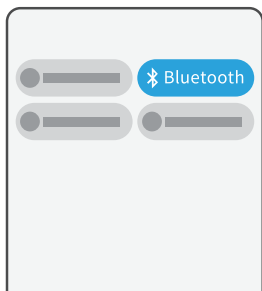

2 「新しいデバイスとペア
設定する」をタップ

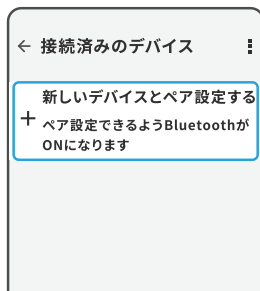

3 充電ケースのフタを開き
しばらく待つ

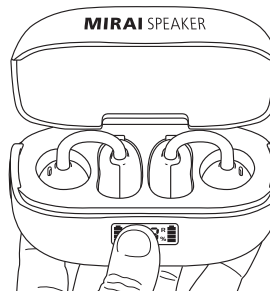

注意 充電ケースのフタを開けてから5分以内にスマートフォンと接続してください。5分を過ぎると「MS Ear Lite」が検出されなくなります。その場合は一度集音器を充電ケースに戻し、再度取り出してから接続を行ってください。

4 「MS Ear Lite」を
タップ



5 チェックを入れる




6 「ペア設定する」を
タップ



* Bluetooth®の接続が上手くいかない場合、設定画面でbluetooth®をオフにし、もう一度最初の手順からお試してください。

集音キャップの入れ替え方法


よりよい使用感を得るために、適切なサイズの集音キャップを使用してください。
装着感に違和感がある、または音が小さいと感じる場合は別のサイズをお試しください。

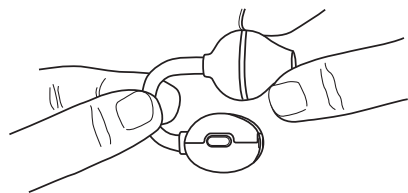

集音キャップの外し方

アーム部をつかみ、集音キャップの端に軽く爪をかけて、やさしく取り外してください。

音の出口

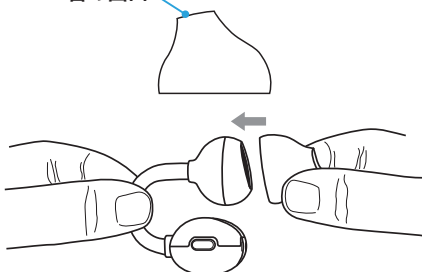

集音キャップの付け方

- 1 イヤキャップには向きがあります。
平らな場所で、左図のように音の出口が左側を向くように置いてください。
- 2 次にイヤホン本体のスピーカー部分が上にくるように持ち、左図のように、音の出口がやや上向きになっている状態でイヤホン本体に集音キャップを差し込みます。

* イヤホン本体と集音キャップ内側の皮脂等の汚れを取ってから装着してください。

* 集音キャップが正しく装着されていないと、充電ケース収納時に正しく充電出来ない可能性があります。

* イヤホン本体を充電ケースに正しく収納すると、ディスプレイの電池残量表示が点灯します。点灯しない場合、正しく充電ができていない可能性があるためイヤホン本体を収納スペースに押し込むようにして奥までしっかり収納してください。

メンテナンスとクリーニング

集音器

- 集音器は清潔に保つことが大切です。熱・湿気・異物は性能低下を招くため、注意してください。
- クリーニングブラシや柔らかい布で、アーム部・本体部・スピーカー部周辺のゴミを取り除き定期的に点検してください。
- マイク部を爪やピンなどで突かないでください。破損の原因になります。
- 集音キャップに詰まった耳あかは付属のブラシで取り除いてください。
- 水、溶剤、洗浄液、オイルなどは使用しないでください。
- 充電用接点は、常に乾燥・清潔に保ってください。

集音キャップ

- 集音キャップは常に清潔かつ乾燥した状態に保つことが重要です。毎日、柔らかい布またはティッシュで拭いてください。

よくある質問

Q イヤホン本体の電源が切れない／充電ケースに入れるとイヤホン本体からキーンという音がする

- A 充電ケースの電池切れの可能性があります。必要に応じて充電してください。
- A イヤホン本体の充電接点不良の可能性があります。汚れを確認し必要があればクリーニングしてください。その後、集音器を充電ケースに戻し、ディスプレイが点灯していれば正常です。

Q 集音器からキーキー音がする

- A 集音キャップが適切にフィットしていない可能性があります。他のサイズの集音キャップに変更をご検討ください。
- A 増幅された音がイヤホンから漏れ、その音が集音マイク部から拾われて発生するハウリングが起こっている可能性があります。集音器の音量を下げてください。
- A 集音キャップまたは集音マイク部に耳あか／異物が詰まっている可能性があります。クリーニングブラシで集音キャップと集音マイク部の耳あか・異物を取り除いてください。

Q 音が小さい／音量の増幅量が小さい

- A 集音器の集音音量を上げてください。
- A 集音器キャップもしくはスピーカー部が詰まっている場合があります。ブラシなどで集音キャップやスピーカーを清掃してください。

Q 両耳ともイヤホン本体の電源が入らない

- A 充電ケースの電池が切れている可能性があります。フタを開けたときに、充電ケースのディスプレイが点灯しているかご確認ください。点灯していない場合は充電ケースを充電してください。
- A 充電ケーブル差込口の接触不良が原因の可能性があります。
コネクタが汚れていないかを確認し、必要であればクリーニングしてください。
その後、イヤホン本体を充電ケースに戻しディスプレイが点灯しているかご確認ください。
点灯していれば正常に充電されています。

Q 片耳のみイヤホン本体の電源が入らない

- A 充電端子の接触不良が原因の可能性があります。
充電端子が汚れていないか確認し、必要であればクリーニングしてください。
イヤホン本体を充電ケースに戻し、ディスプレイが点灯するかご確認ください。
点灯すれば、正常に充電されています。
点灯しない場合、正しく充電ができていない可能性があるため、イヤホン本体を収納スペースに押し込むようにして奥までしっかり収納してください。

イヤホン本体が正常に充電出来ない（ディスプレイが正しく点灯しない）

- A** イヤホン本体に集音キャップが正しく取り付けられており、ずれや反り、変形がないことを確認してください。
- A** それでも正常に充電が出来ない場合、集音キャップを一度取り外し、正しい手順で再度装着してください。集音キャップの音の出口がイヤホン本体のスピーカー部に合うように均等に差し込んで装着します。詳しい集音キャップの取り付け方は本取扱説明書の「集音キャップの入れ替え方法」のページをご確認ください。
*このとき、付属の集音キャップ以外は使用しないでください。
- A** イヤホン本体を充電ケースに収納するとき、集音キャップが充電ケースの収納部分に干渉しないように手で軽く押し込み、イヤホン本体の充電端子部が充電ケース側の充電端子部にしっかりと接触するように収納してください。正しく収納されている場合、ディスプレイの電池残量表示が点灯します。
- A** イヤホン本体の充電端子部や充電ケースの充電端子部を柔らかい布などで定期的に清掃し、異物や汗汚れが残らないようにしてください。

集音器の装着が不快

- A** 4つのサイズの集音キャップをご用意しています。ご自身に合った快適なサイズの集音キャップに交換してください。指示に従って装着し、イヤホン本体を快適な位置に調整してください。

Bluetooth® 画面で集音器のデバイス名が見つからない

- A お使いのデバイスの OS バージョンが古い可能性があります。
OS を最新バージョンに更新してから集音器を接続ください。
- A お使いのデバイスの Bluetooth® がオンになっていること、集音器の電源が入っていることをご確認ください。それでも接続できない場合、すでに他のデバイスと接続されている可能性があります。以下の方法でリセットをお試しください。

リセット 方法

充電ケースのフタを開け、イヤホン本体を収納した状態で、フタを開けて閉じる動作を8秒以内に5回繰り返してください。成功するとディスプレイが5回点滅します。その後、多機能ボタンを10秒間長押ししてください。リセットが成功すると、既存のデバイスとのBluetooth接続が解除されます。その後、新たなデバイスにBluetooth®を再接続してください。

Bluetooth® との自動再接続がされない

- A デバイスの Bluetooth® がオンになっていること、イヤホン本体の電源が入っていることをご確認ください。
- A それでも再接続されない場合、すでに他のデバイスに Bluetooth® が接続されている可能性があります (2台以上の同時接続はできません)。他のデバイスとの接続を解除 / リセットしてください。

保管方法/廃棄・輸送に関する注意

保管方法

幼児の手の届く所に置かないでください。

また、直射日光が当たる環境や湿度の高い場所を避けて保管をしてください。ストーブなどの熱源の近くに置きますと発火爆発の危険性があります。

廃棄・輸送に関する注意



Li-ion

- 本製品は分別回収の対象です。一般ごみとして捨てず、各自治体や電池リサイクル制度の指示に従って廃棄してください。
- 内蔵バッテリーを自分で分解/取り外さないでください。感電/発火/けがの原因となります。
- 本製品と充電ケースにはリチウムイオン電池が内蔵されています。航空機内への持ち込みや機内預けをされる場合は、ご利用の航空会社へご確認をお願いいたします。
- 機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
この充電式電池の取り外しおよび廃棄をお客様ご自身では行わず、ミライスピーカーの相談窓口にお問い合わせください。
一緒にゴミとして捨てると、ごみ収集作業の際に発熱・発火の危険があります。

仕様

仕様項目	詳細
型番	MSE-MIRAI02
イヤホン重量	5.6g (片耳)
充電ケース重量	57.9g
イヤホンバッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー (3.7V 55mAh)
充電ケースバッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー (3.7V 550mAh)
イヤホン充電時間	約2時間
充電ケース充電時間	約2時間
集音機能時間	最大10時間
Bluetooth®オン時の最大音楽再生時間	最大6時間
最大出力音圧レベル	122dB+3dB
防水・防塵仕様	IP55
Bluetooth®バージョン	Ver.5.4 class2
対応Bluetooth®プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
音楽コーデック	SBC, AAC
動作温度	-10℃～40℃

* 本製品は曲面サウンド®の技術を用いた製品ではありません。

* イヤホン重量は集音キャップ重量を含みません。

電波干渉についての対策方法

本機の使用周波数は2.4GHz帯です。電波の特性上、下記環境や使用方法では通信が途切れたりする事がありますが、製品不良ではありません。ご了承ください。

- ・ モバイルルーターを所持された状態での使用
 - ・ 交通信号システムや無線LANアンテナ等が多く設置された場所での使用
 - ・ スマホ等のデバイスが人体に接している状態での使用
- 上記環境等で使用すると電波干渉のためノイズや音切れが発生する場合があります。その場合、無線機器から10m以上離れてご使用ください。

使用周波数と注意事項

本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同様無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と言う)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
3. ご不明な点や、その他お困りのことが生じたときは、サポートまでお問い合わせください。

- ・ 本機は無線設備として技術基準適合証明等を受けています。
- ・ 本製品は日本の電波法の技術基準に適合しています。本製品を総務省の許可なしに改造して使用することはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

Earphone
MSE-MIRAI01-EP



R210-263489

Charging case
MSE-MIRAI01-CC



R210-263495

保証書

品名	ミライスピーカー・イヤールイト
型式	MSE-MIRAI02
お買上げ日	年 月 日

この度はミライスピーカー製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。本書をご提示のうえ、取扱販売店または当社窓口へ修理をご依頼ください。

保証期間		お買上げから 1 年
お客様情報	ご住所	
	ご連絡先	
	ご氏名	

販売店記入欄

株式会社ミライスピーカー

フリーダイヤル：0800-33-37-414

9:00～18:00(土日祝除く) 携帯電話からでも通話無料

【販売店様へのお願い】

必ず太枠内の所定事項を記入のうえ、お客様にお渡しください。

【お客様へのお願い】

保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がない時には、「領収書」または「納品書」などといっしょに本書を提出してください。

お客様登録のお願い

修理や故障のご依頼の際には、お客様情報をご登録いただくと、よりスムーズに対応できます。ぜひこの機会にご登録ください。

* ご購入から12カ月以内にお手続きください




商品のお問い合わせや故障・修理のご依頼は、お買い上げのお店または、
右記 QR コードよりご連絡ください。

株式会社ミライスピーカー

 0800-33-37-414 9:00~18:00 (土日祝除く)
携帯電話からでも通話無料

ミライスピーカー サポート

検索

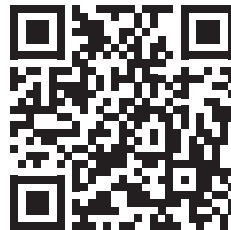

MIRAI SPEAKER®

この取扱説明書の内容は、2026年6月現在のものです。仕様や外観は、予告なく変更される場合があります。

MIRAI SPEAKERロゴは、株式会社ミライスピーカーの登録商標または商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ご不明な点や修理に関するご相談は <https://miraispeaker.com/support> をご覧ください。

本製品には、曲面サウンド®は搭載していません。

Bluetooth®接続及びアプリとの動作はそのすべての接続・動作を保証するものではありません。