

ミライスピーカー・イヤー | ミライスピーカー・イヤー ライト

使い方に迷ったら、
まずはお客様サポートページへ。



使い方、各種解説動画、よくあるご質問まで、
最新情報をわかりやすく紹介しています。
サポートへのお問合せもこのページからできます。

ミライスピーカー サポート

検索



MIRAI SPEAKER®
Ear

※本ガイドに掲載している画面は、iPhone (iOS) 版の画面です。
Android 版では、一部の画面表示や操作方法が異なる場合があります。

※アプリのアップデートにより、画面表示が変更される場合があります。
最新の情報は、お客様サポートページをご確認ください。

ミライスピーカーコールセンター (スマホでも通話無料)

☎ 0800-33-37-414

9:00~18:00 (土日祝除く)

<https://miraispeaker.com/>

株式会社ミライスピーカー
東京都中央区東日本橋2丁目22番1号8階

MIRAI SPEAKER®

この取扱説明書の内容は、2026年6月現在のものです。仕様や外観は、予告なく変更される場合があります。
MIRAI SPEAKERロゴは、株式会社ミライスピーカーの登録商標または商標です。
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ご不明な点や修理に関するご相談は <https://miraispeaker.com/support> をご覧ください。
本製品には、曲面サウンド®は搭載していません。
Bluetooth®接続及びアプリとの動作はそのすべての接続・動作を保証するものではありません。

ミライスピーカー・イヤーをご購入の方向け

専用アプリかんたんスタートガイド

STEP 1

お使いのスマートフォンのBluetooth®をオンにしてください。

詳しくは製品同梱の取扱説明書「スマートフォンとの接続方法」をご確認ください。

STEP 2

専用アプリをインストールしてください。

QRコードから



上記QRコードを読み取ると
ミライスピーカーの公式サポートページが開き、
専用アプリのダウンロード案内が表示されます。

検索から


- 1 iPhoneの場合は「App Store」、
Androidの場合は「Google Play」を
開きます。
- 2 アプリの検索窓に
「ミライスピーカー」と入力します。
- 3 ミライスピーカー・イヤー アプリが
表示されたら「入手」または
「インストール」を押して、アプリを
スマートフォンにインストールします。

開いて設定をはじめる →


「聞こえ調整」には、「テスト音で調整」と「既存のテスト値入力」の2種類があります。
ここでは、「テスト音で調整」の方法をご案内します。

STEP 3 ミライスピーカー・イヤーを接続する

- 1 専用アプリを起動し、Bluetoothの利用を許可してください。
- 2 各種規約をご確認のうえ、同意にチェックを入れ、「集音器を接続する」を押してください。

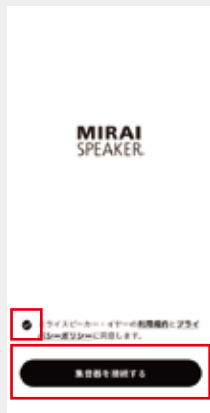

- 3 充電ケースからイヤホン本体を取り出し、両耳に装着してください。

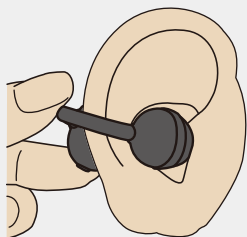

※ 初めてご使用になる場合は、取扱説明書の「初めてご使用になるまえに」をご確認ください。

⚠️ ご注意

複数台ご購入の方へ：初期接続は必ず1台ずつ行ってください（同時に行くと正しく認識されません）。
なお、一度接続した後は、複数台同時に使用しても問題ありません。


STEP 4 「聞こえ調整」の準備をする

- 1 初めて専用アプリを起動すると、「聞こえ調整」画面が表示されます。「テスト音で調整」を押してください。
- 2 静かな場所に移動し、「次へ」を押して周囲の環境音を測定します。測定が終わったら「聞こえ調整を開始」を押します。

マイクへのアクセス許可を求められたら、「許可」を押してください。



- 3 調整方法の説明を確認し、「聞こえ調整を開始する」を押してください。

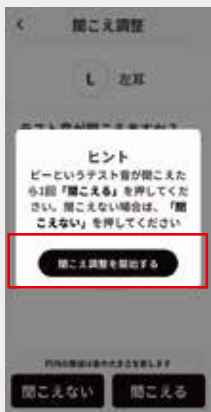

ポイント

- 専用アプリの2回目以降の起動では、音量調整画面が表示されます。再度「聞こえ調整」を行う場合は、画面右上の歯車マークを押し、表示されるメニューから「聞こえ調整」を選択してください。



- 聞こえ調整は、60dB以下の静かな環境で行うことをおすすめします。周囲の音が大きい場合はアラートが表示されますので、静かな場所で再度お試しください。

STEP 5 「聞こえ調整」を行う

- 1 聞こえ調整が始まります。ピー音が聞こえたら「聞こえる」聞こえなかったら「聞こえない」を押してください。

調整は「左耳」→「右耳」の順に進みます。所要時間は両耳で約5分です。




ポイント

画面中央の数字が変わるたびにテスト音が再生されます。音が聞こえなかった場合は、「聞こえない」を押してください。




STEP 6 設定を完了する

- 1 調整完了後、「聞こえデータ」画面が表示されます。「デバイスに書き込み」を押してください。

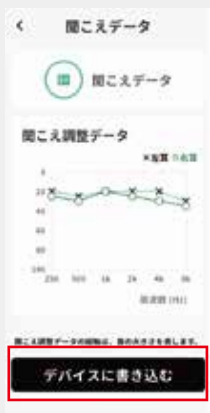

- 2 「デバイスに書き込み完了」と表示されたら、「保存」を押してください。

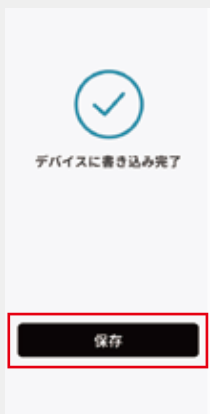

設定は完了です。調整内容がイヤホン本体に保存されました。